

Manual de Instruções





olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Guia de Intubação Mikatos®


- *Modelo Adulto = 425 mm (Comprimento Total)*
- *Modelo Infantil = 300 mm (Comprimento Total)*



FINALIDADE

A Intubação endotraqueal ou orotraqueal **(IOT)** é um procedimento onde o médico, com um Laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz o tubo na traquéia.

O tubo endotraqueal será utilizado para auxiliar na ventilação do paciente, pois possibilita que seja alcançada o funcionamento dos pulmões.

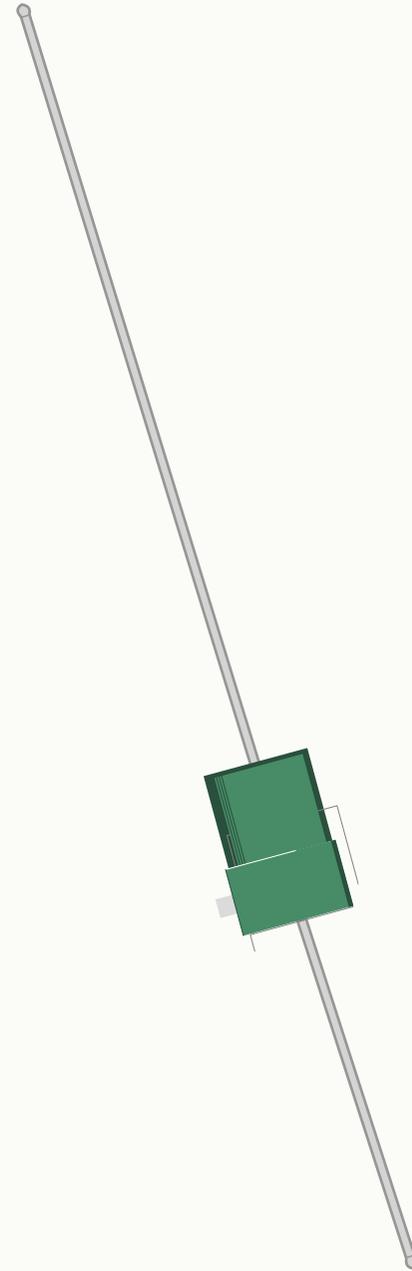

01



GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL)

**COMPONENTES
DO PRODUTO**

02



Guia de Intubação (mandril tipo vareta)

GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL)

COMPONENTES DO PRODUTO

INSTRUÇÕES

- ✓ Introduzir totalmente o guia por dentro da sonda
- ✓ Ajustar o botão na posição de uso encaixando-o na parte superior do tubo através do parafuso regulador
- ✓ Moldar o tubo endotraqueal até obter a curvatura desejada conforme a anatomia do paciente
- ✓ Introduzir o tubo cuidadosamente para uma intubação correta evitando danos ao paciente
- ✓ O guia de intubação só deve ser utilizado por pessoas que tenham recebido treinamento e qualificação adequada

PROCEDIMENTOS

OPERACIONAIS E INSTRUÇÕES DE USO



ACESSÓRIOS

- ✓ 01. CERTIFICADO DE GARANTIA
- ✓ 01. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO

COMPONENTES

- ✓ 01. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO
- ✓ 01. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO
- ✓ 01. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO

EMBALAGEM

- ✓ 01. EMBALAGEM PLÁSTICA

OPCIONAL

- ✓ 01. Guia de intubação (mandril tipo vareta) *SEM BOTÃO*

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos médicos. a validade dos produtos médicos é determinada pelo funcionamento deles e pelo manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para realizar os procedimentos de limpeza o guia de intubação (mandril) mikatos® deverá ser totalmente desmontado para a remoção de qualquer resíduos existente, realize o procedimento com o uso de luvas de proteção (Látex) descartáveis. A desinfecção de limpeza deve ser realizada com uma solução de glutaraldeído a 2% e mantenha as peças totalmente imersas por um período de 30 minutos, Após a limpeza, enxaguar as peças em Álcool Anídrido (100% puro) ou água estéril e deixe secar em ambiente livre de contaminações.

Orientações para cuidados e limpeza



Esterilização

Para a esterilização os componentes pode ser colocados em autoclave a 130°C por três minutos. Em seguida montar as peças e acondicionar na embalagem que acompanha o produto.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem prejudicar ao profissional e ao paciente

ARMAZENAMENTO

Para preservar o aparelho contra a deterioração, o mesmo deve ser guardado em local protegido do calor, umidade e as intempéries atmosféricas

Orientações para cuidados e limpeza



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI®, assegura ao proprietário do produto, garantia contra falha material e humana a produção pelo prazo constante no manual de instruções a contar da data da nota fiscal de compra do cliente/usuário.

O aparelho tem garantia de **01 ano** contra defeitos de fabricação e desgaste natural. Estão **cobertas** pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.

A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu Revendedor o completo preenchimento deste certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra.

Fabricado e distribuído por:
MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO • EIRELI.®

CNPJ: 05.030.501/0001-34 • INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS • 325 • PARQUE ESPLANADA • EMBU DAS ARTES/SP
CEP: 06817-170 • SAC • (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO • ENGENHEIRO • ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1
REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE **ANVISA EM FASE DE OBTENÇÃO**
VALIDADE DO PRODUTO: 2 ANOS

