

Manual de Instruções






olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Lanterna Clínica Mikatos®


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

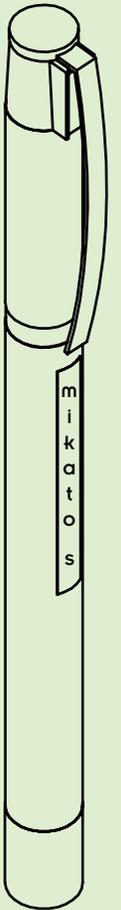

APLICAÇÃO

A **Lanterna Clínica Mikatos®** é um aparelho portátil de fácil manuseio destinado à iluminação não invasiva de áreas sombreadas do organismo, como garganta, ouvido e narinas. Tem a função de melhorar a visualização destas áreas e assim auxiliar no diagnóstico de patologias que manifestem alterações nestas regiões.

01

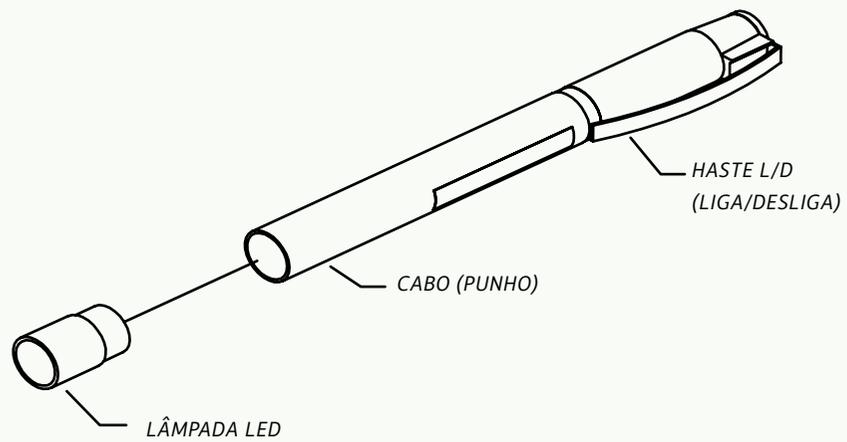


Componentes do produto

Lanterna Clínica Mikatos®


Dimensões Gerais

da Lanterna Clínica Mikatos®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

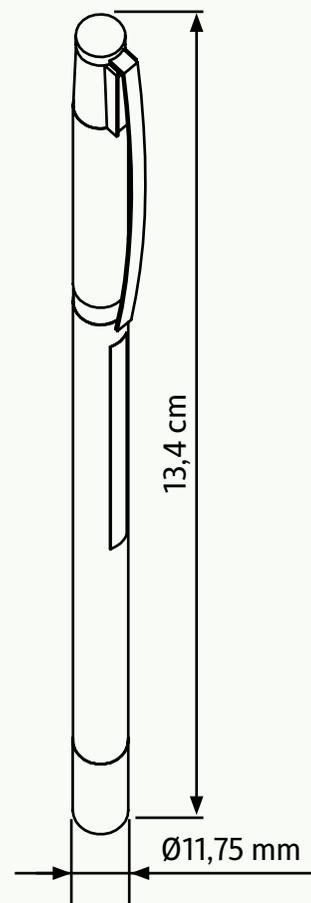

CORES

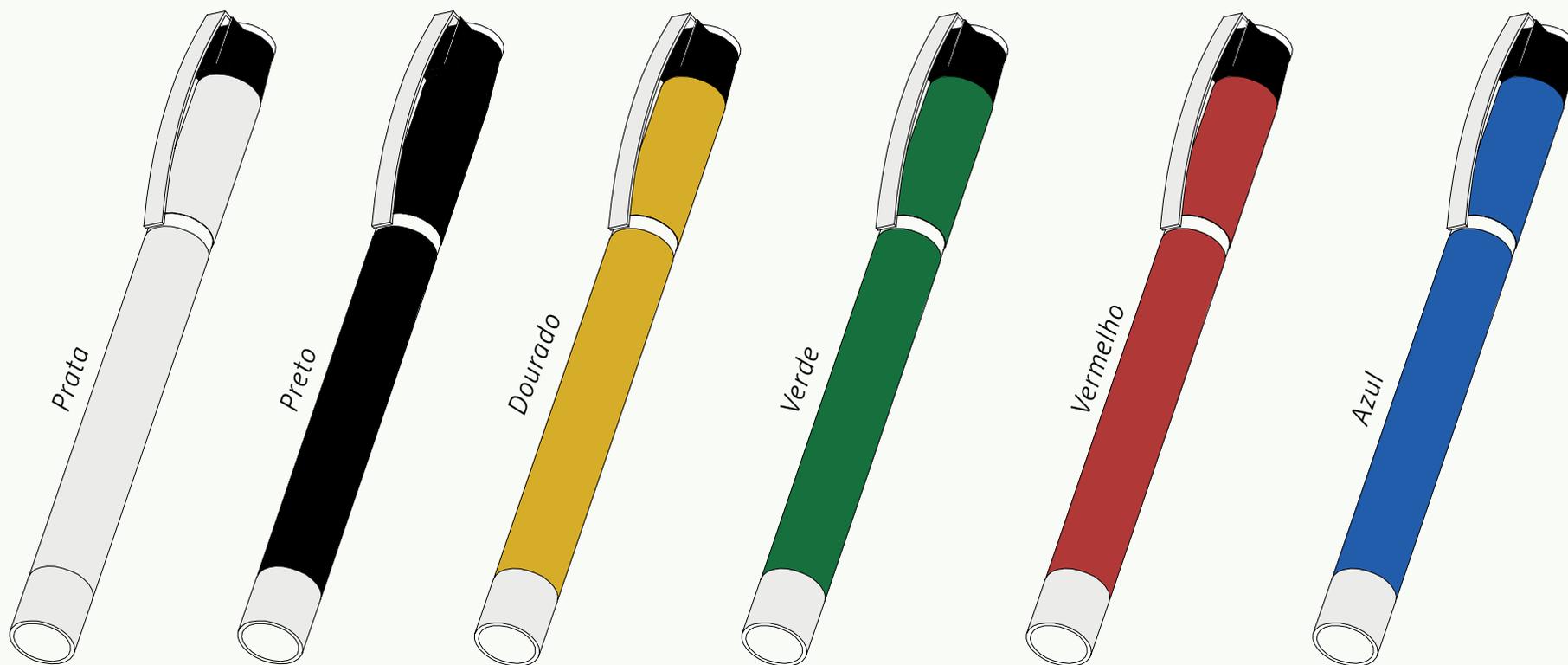

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Retirar a lâmpada do LED da extremidade do cabo girando no sentido-horário;
- ✓ Colocar duas pilhas pequenas AAA (tipo palito) no interior do cabo (punho) e rosquear a lâmpada LED no sentido horário para fechar a **Lanterna Clínica Mikatos®**;
- ✓ Em seguida, para ligar o LED da Lanterna Clínica Mikatos, segurar o cabo e empurrar a haste com leve pressão contra o mesmo até encostar;
- ✓ Para desligar, fazer a operação contrária soltando a haste do cabo;
- ✓ Evitar quedas ou qualquer outro tipo de manuseio que comprometa o funcionamento do produto;
- ✓ Para conseguir a eficiência de luz, recomendamos o **uso de pilhas alcalinas** para um melhor funcionamento;
- ✓ As pilhas devem ser retiradas após cada utilização para não serem danificadas.

Procedimentos operacionais e instruções de uso

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Utilização em ambientes e armazenagem com temperaturas de 0°C a 40°C e umidade relativa do ar: menor ou igual a 90%;
- ✓ Desinfecção química: Álcool Etílico 70%, somente;
- ✓ Dimensões: 13,4 cm de comprimento e 11,75 mm de diâmetro;
- ✓ Peso do produto: 20 g (com embalagem);
- ✓ Componentes: Haste L/D (Liga/Desliga), cabo e lâmpada LED em liga de Alumínio;

- ✓ • Lâmpada LED - 3,0 V (Volts);
- ✓ Iluminação: Luz Branca (LED Branco Frio);
- ✓ Corrente Elétrica: 0,25 mA (miliAmpéres);
- ✓ Fluxo Luminoso: 4.000 mCd (miliCandelas);
- ✓ Temperatura de Cor: 5.500 K - 6.000 K (Kelvin);
- ✓ • Vida útil (mínima): 20.000 h (horas).

Dados Técnicos do produto

Lanterna Clínica Mikatos®

EMBALAGEM CONTENDO

- ✓ 01 - LANTERNA CLÍNICA MIKATOS®
- ✓ 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA
- ✓ 01 - ESTOJO DE PAPELÃO CARTONADO

**O APARELHO NÃO
VEM ACOMPANHADO
DE PILHAS**

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza e desinfecção de produtos médicos servem para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para uma maior preservação dos produtos médicos-hospitalares. A validade dos produtos é estipulada pelo desempenho e pelo manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A **Lanterna Clínica Mikatos®** deve ser limpo externamente com um pano seco e o uso produtos neutros. Seque em seguida com um pano seco que não solte fíapos.

Orientações para cuidados e limpeza



CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Não expor a **Lanterna Clínica Mikatos** à temperaturas e umidades extremas, acima de 50°C (graus Celsius) e 90% de umidade relativa do ar;
- Proteger a **Lanterna Clínica Mikatos** de pancadas ou choques (movimentos bruscos, quedas ou batidas);
- **NUNCA** mergulhar a **Lanterna Clínica Mikatos** em qualquer tipo de líquido;
- Conservar o aparelho sempre limpo e limpar exclusivamente com pano umedecido em água pura ou numa solução desinfetante neutra (isenta de Cloro);
- A Lanterna Clínica Mikatos destina-se apenas ao uso não invasivo;
- **NUNCA** deixar este aparelho ao alcance das crianças e animais, porque contém peças pequenas que podem ser engolidas facilmente (pilhas, lâmpadas, etc...);
- **NUNCA** deixar as pilhas dentro do aparelho quando não estiver em uso, pois podem danificar seus componentes em caso de deterioração das mesmas (vazamento).

Orientações para cuidados e limpeza



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao proprietário do produto garantia contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **01 ano** a contar da data da **Nota Fiscal** de compra do cliente.

Estão **cobertas** pela garantia, as peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.

A garantia não se aplica às lâmpadas.

A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transportes entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP

CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS SIMÕES

CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1

REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - 80218930014

VALIDADE: INDETERMINADA

mikatos