

# Manual de Instruções



# olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.




# **Suporte de Soro Móvel em Aço Inox Mikatos®**




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

## FINALIDADE

O Suporte de Soro Hospitalar Móvel Mikatos® em Aço Inox possui suporte para 04 (quatro) ganchos de fixação para bolsas, haste móvel para regulagem de altura de 1,10 m a 1,70 m (metro), base tipo “H” com 04 (quatro) rodízios para movimentação e transporte. Pode ser utilizado para fixação da bomba de infusão peristáltica no procedimento de controle da dosagem dos medicamentos e alimentação intravenosa.

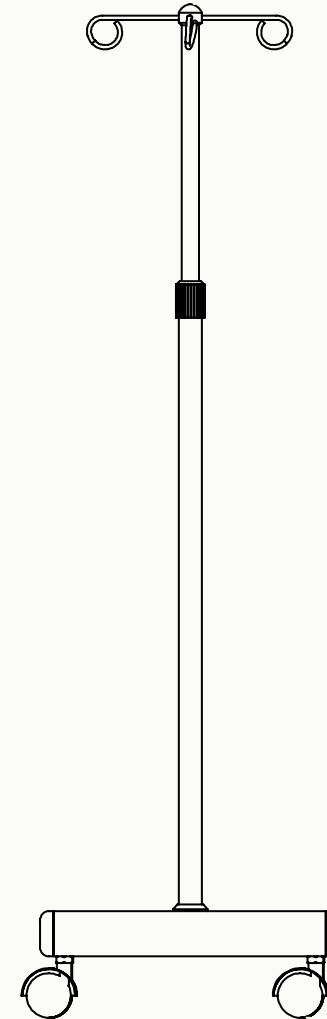

01

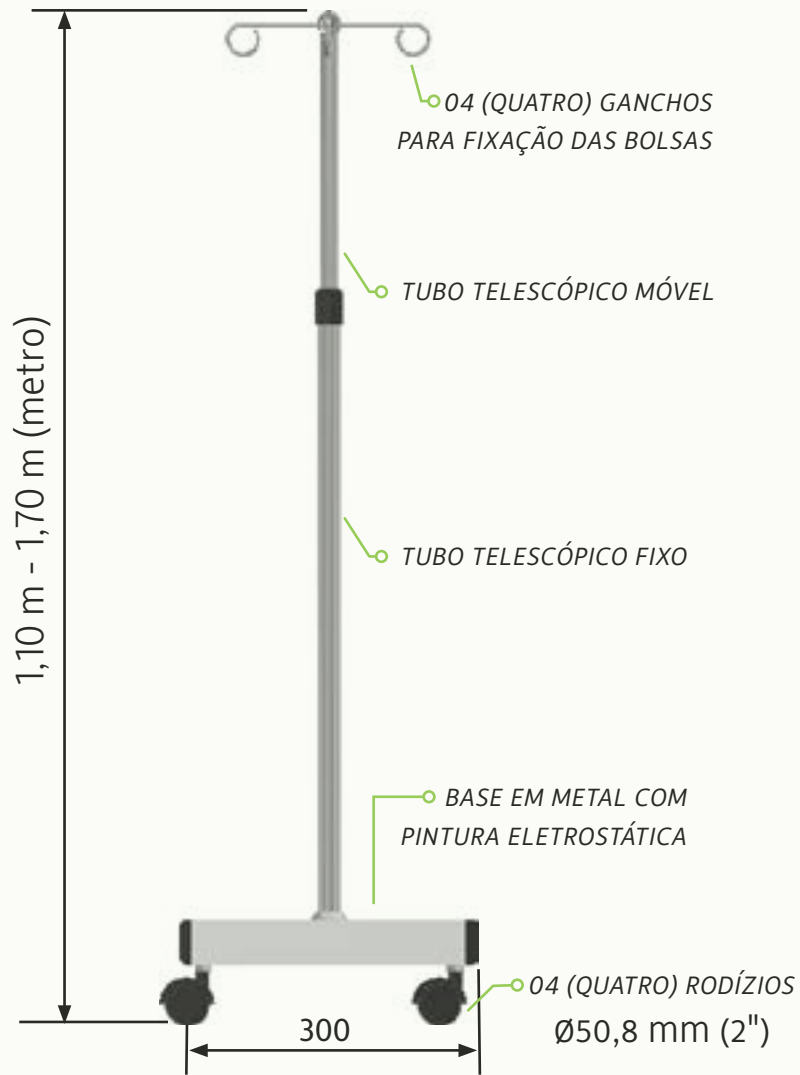

## Componentes do produto

Suporte de Soro Móvel Mikatos®

## INSTRUÇÕES

---

- ✓ Com uma das mãos segurar o tubo telescópico (fixo) e com a outra girar o regulador de altura no sentido anti-horário para soltar o tubo telescópico (móvel)
- ✓ Em seguida descer e subir o tubo telescópico móvel para a altura desejada
- ✓ Fixe o aparelho na posição desejada girando o regulador de altura no sentido horário
- ✓ Colocar as bolsas nos ganchos pendurando nos encaixes existentes
- ✓ Efetuar a fixação do conjunto no braço do paciente regulando o fluxo do líquido da bolsa, para uma situação de conforto e eficiência
- ✓ Após o procedimento, desconectar o conjunto do braço do paciente e descartar o material utilizado (bolsa, mangueira, agulha)

---

## Procedimentos operacionais e instruções de uso

---

## SUPORTE DE SORO MIKATOS®

---

- ✓ Altura ajustável através de conexão com rosca (tipo mandril) em Poliamida (Nylon)
- ✓ Colunas (hastes) com tubos redondos de Aço Inoxidável ( $\emptyset 3/4"$  e  $\emptyset 1"$ )
- ✓ Ponteira plástica de proteção na ponta do tubo telescópico móvel
- ✓ Ganchos redondos de Aço Inox com capacidade para quatro bolsas
- ✓ Base em metal com pintura eletrostática epóxi com quatro ponteiros plásticos com proteção nas extremidades
- ✓ Rodízios (04 peças) -  $\emptyset 50,8$  MM (2")
- ✓ Aparelho livre de corrosão pois possui componentes em aço inoxidável, plástico e base com pintura eletrostática epóxi de alta existência

---

# Procedimentos operacionais e instruções de uso

---

## COMPONENTES

---

- ✓ 04 - GANCHOS PARA FIXAÇÃO DAS BOLSAS
- ✓ 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA
- ✓ 01 - EMBALAGEM EM PAPELÃO ONDULADO



## INSTRUÇÕES GERAIS

---

A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos médicos. A validade dos produtos médicos é determinada pelo funcionamento correto e pelo manuseio cuidadoso.

## LIMPEZA E DESINFECÇÃO

---

Para realizar os procedimentos de limpeza o Suporte de Soro Mikatos®, utilizar pode ser limpo por fora com um pano úmido até que seja atingida a limpeza desejada. A desinfecção e limpeza deve ser realizada de acordo com as especificações do fabricante do desinfetante neutro. Depois da desinfecção limpar o instrumento com um pano úmido para remover os eventuais resíduos de desinfetante neutro utilizado.

# Orientações para cuidados e limpeza

---



## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

---

A higienização é fundamental para evitar contaminações que podem trazer prejuízos ao profissional e ao paciente.

Nunca utilizar no Suporte de Soro em Aço Inox Mikatos® material abrasivo ou palha de Aço. O produto não está liberado para utilização na limpeza e esterilização de máquinas.

## ARMAZENAMENTO

---

Para preservar o aparelho contra danos e deterioração, o mesmo deve ser guardado em local protegido do calor, umidade e das intempéries atmosféricas.

# Orientações para cuidados e limpeza

---



# CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao proprietário do produto, Garantia contra falha material e humana na produção pelo prazo constante no Manual de Instruções a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente/usuário.

O aparelho tem Garantia de **01 ano** contra defeitos de fabricação e desgaste natural. Estão **cobertas** pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal do material.

A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu Revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de Garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra.

Fabricado e distribuído por:

**MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI.**

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA  
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP  
CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS SIMÕES  
CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1

**REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - EM FASE DE OBTENÇÃO**  
**VALIDADE DO PRODUTO: 02 ANOS**

